

AirFluSal® Forspiro®

Ușor de utilizat! Simplu de continuat!

AirFluSal®
Forspiro®

Mod de administrare

01

Deschidere
și încărcare



02

Inhalare
doză



03

Eliminare
blister



Medicul v-a prescris pentru afecțiunea dumneavoastră medicamentul AirFluSal® Forspiro® - pulbere unidoză de inhalat (fluticazonă propionat /salmeterol). Aceste instrucțiuni trebuie citite împreună cu prospectul medicamentului, care se găsește în cutia medicamentului. Dacă aveți întrebări legate de sănătatea dumneavoastră, tratament și alte aspecte ale îngrijirii, vă rugăm consultați medicul sau farmacistul.

Design intuitiv cu triplu mecanism de feedback: auditiv, vizual, gustativ



La manevrarea brațului mobil veți auzi un **dublu click**: un click după încărcarea dozei și cel de-al doilea click la perforarea blisterului.

Caracteristicile vizuale de control vă oferă siguranță în privința dozelor:

- **capacul** (care protejează piesa bucală) se îndepărtează ușor și rămâne atașat de dispozitiv
- **piesa bucală** este parte din brațul mobil
- **brațul mobil** simplu pentru încărcarea dozei:
 - veți observa doza încărcându-se
 - blisterul cu dozele separate individual este vizibil sub brațul mobil
 - degetul mare indică direcția de deschidere a brațului



Fereastra interactivă de dozare permite verificarea zilnică și vă oferă siguranță în privința administrării corecte a tratamentului:

- După fiecare doză utilizată, banda de blister devine vizibilă în fereastra interactivă
 - După două inhalatii banda de blister poate fi eliminată, permițând o verificare zilnică
 - Dacă inhalarea se face **incomplet** sau **incorect** se va observa pulbere albă în fereastra transparentă
-



După administrare veți percepe un gust plăcut, datorită conținutului de lactoză, astfel veți avea confirmarea că v-ați administrat doza.